

# Kerr™

## CASO CLÍNICO

# Reabilitação estética com resina composta



## Prof. Thayron de Souza Parreira

CRO-SP 115.080

@thayronparreira

- Especialista em Implantodontia - São Leopoldo Mandic
- Especialista em Prótese - São Leopoldo Mandic
- Especialista em Cirurgia Periodontal Estética e Perimplantar - São Leopoldo Mandic
- Proprietário da Clínica INTENSIFY - Reabilitação Oral e Estética
- Professor do curso INTENSIFY - Estética Avançada em Resinas Compostas Anteriores

## CASO INICIAL



## CONCHA PALATINA



Foi utilizado o frasco *Adhesive* por ser condicionamento total em esmalte (OptiBond™ FL).

Para confecção da concha palatina, foi utilizado resina translúcida cor *blue* (Harmonize™ TB).



## INCREMENTO COM RESINA



Realizado incremento com resina dentina A1, (Harmonize™) na camada de dentina, esmalte A1 (Harmonize™) na camada de esmalte e translúcida *blue* (TB) na camada de efeito incisal.



## ACABAMENTO



Realizada a etapa de acabamento e polimento, utilizando o protocolo com os discos OptiDisc™.



## ASPECTO FINAL



Aspecto frontal



Aspecto lateral

## ASPECTO DE FRENTE



Antes



Depois

## ASPECTO LATERAL



Antes



Depois

## ASPECTO FINAL DO SORRISO



# Kerr™



Ficou interessado na resina  
do camaleão?

**Sim, tenho interesse**

**Ao clicar no botão você será direcionado(a) para  
uma página com mais informações do produto.**