

CASO CLÍNICO

Rehabilitación estética con resina compuesta



Prof. Thayron de Souza Parreira

Titulación Académica - CRO-SP 115.080


@thayronparreira

- Especialista en Implantodoncia - São Leopoldo Mandic
- Especialista en Prótesis - São Leopoldo Mandic
- Especialista en Cirugía Periodontal Estética y Periimplantaria - São Leopoldo Mandic
- Propietario de la Clínica INTENSIFY - Rehabilitación Oral y Estética
- Profesor del curso INTENSIFY - Estética Avanzada en Resinas Compuestas Anteriores

CASO INICIAL




REGIÓN PALATINA

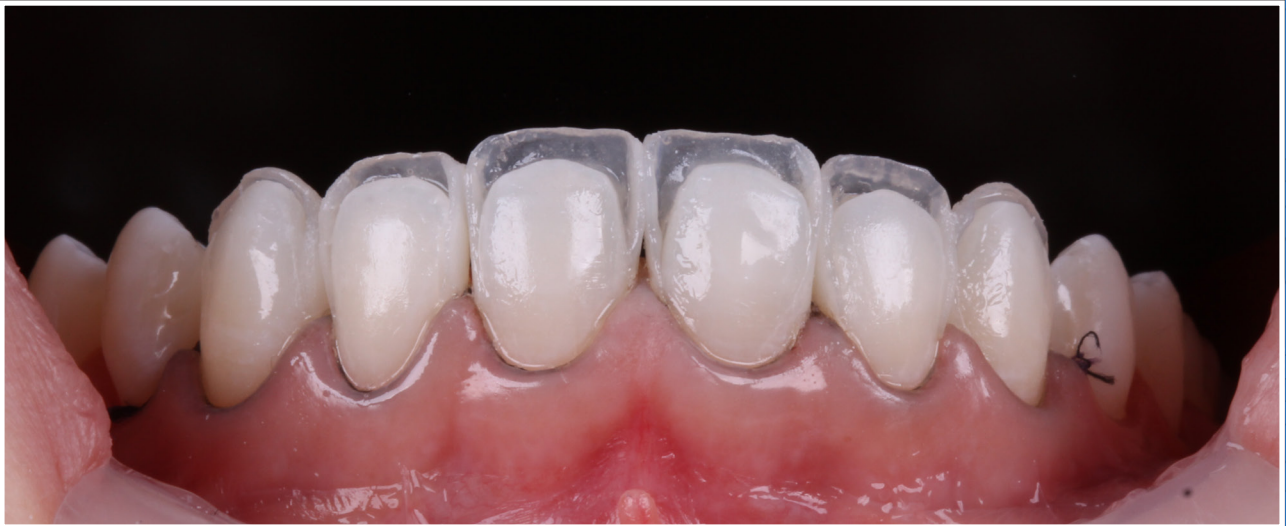

Fue utilizado el frasco *Adhesive* por ser acondicionamiento total en esmalte (OptiBond™ FL).

Para la confección de la región palatina, se utilizó resina translúcida color *blue* (Harmonize™ TB).

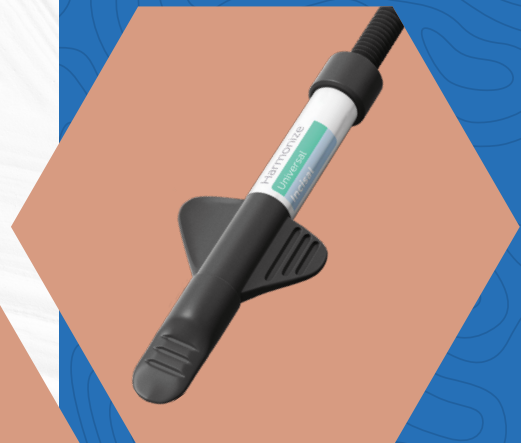


INCREMENTO CON RESINA



Realizado incremento con resina dentina A1, (Harmonize™) en la capa de dentina, esmalte A1 (Harmonize™) en la capa de esmalte y translúcida *blue* (TB) en la capa de efecto incisal.



ACABADO

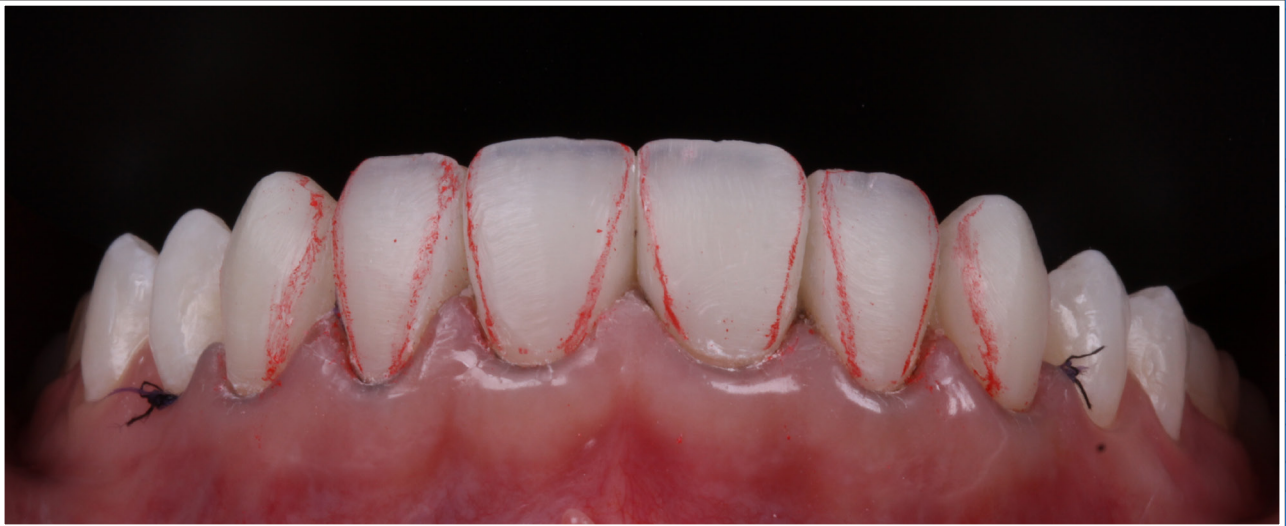

Realizada la etapa de acabado y pulido, utilizando el protocolo con los discos Optidisc™.



ASPECTO FINAL



Aspecto frontal



Aspecto lateral

ASPECTO DE FRENTE




Antes



Después

ASPECTO LATERAL

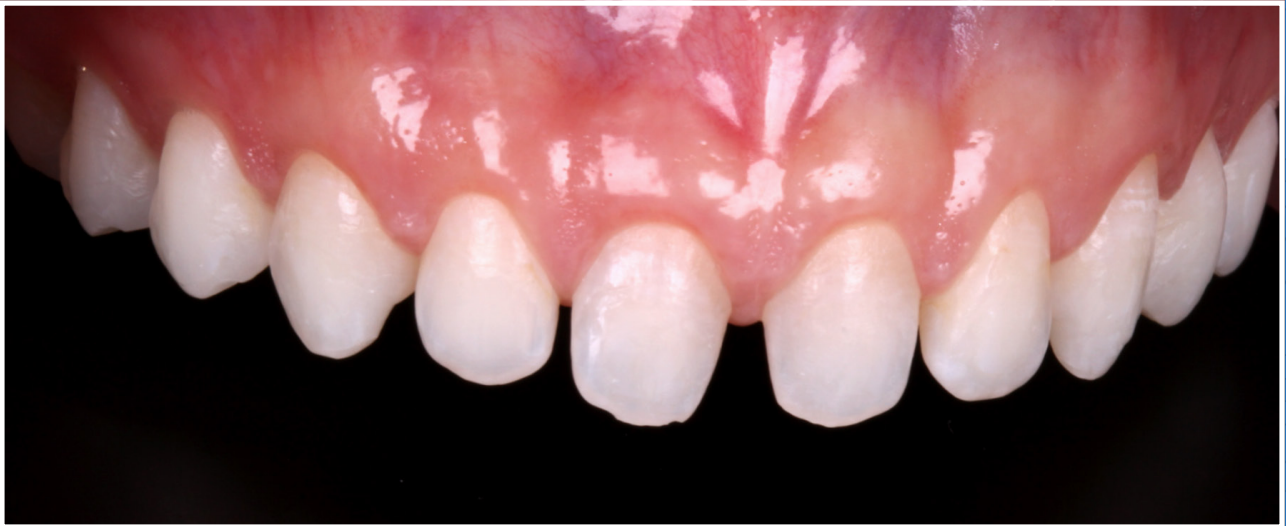

Antes




Después

ASPECTO FINAL DE LA SONRISA



Kerr™

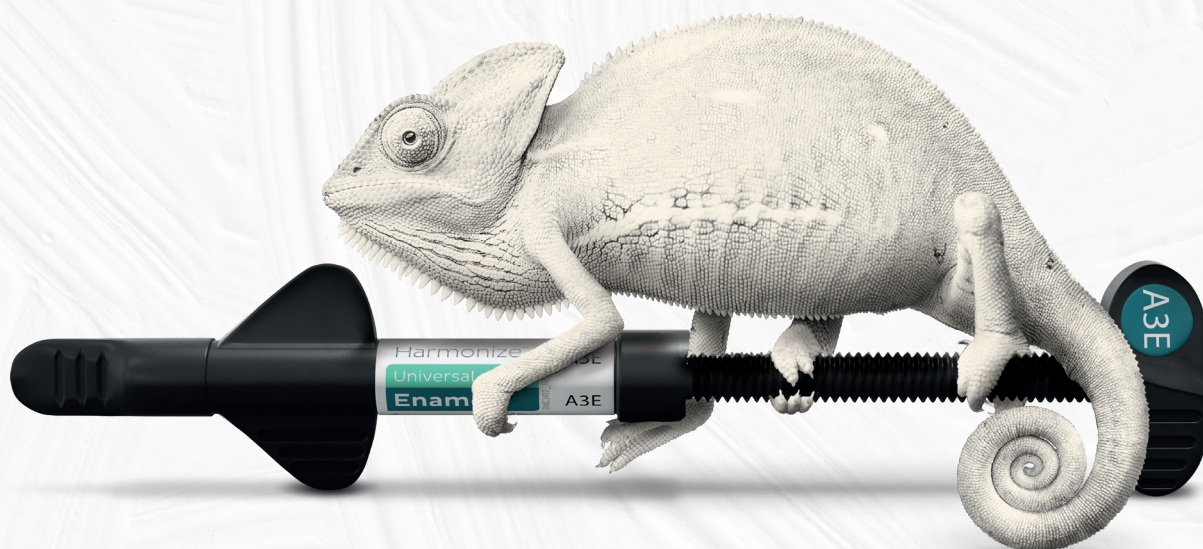

¿Te ha interesado la resina
del camaleón?

Sí, me interesa.

**Al hacer clic en el botón serás dirigido(a) a una
página con más información del producto.**